

NÁVOD NA OBSLUHU



Infusní stojan

ISN-5

Výrobce pracuje podle certifikovaného systému řízení jakosti dle norem EN ISO 9001:2009. Výrobek je vyroben v souladu s Nařízením vlády č. 336/2004, které stanovuje technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky a je registrován na MZČR.

Bezpečnostní pokyny

- před vlastním užitím stojanu je nezbytné seznámit se s návodem na obsluhu a používat jej výhradně v souladu s ním. Do té doby s ním nemanipulujte.
- stojan smí být používán pouze v interiéru v rozmezí teplot 16 - 40 °C a do relativní vlhkosti 75%
- stojan smí být používán pouze na rovných podlahách
- stojan smí být zatěžován rovnoměrně po 5kg na nerezový háček a po 2 kg na plastový háček, jinak hrozí nebezpečí úrazu pacienta překlopením stojanu nebo poškozením konstrukce hlavice s háčky stojanu.

Nebezpečí úrazu obsluhy, třetí osoby nebo poškození okolního zařízení může vzniknout především:

- přetěžováním stojanu
- nedovoleným používáním jako podpěry a vodítka pro pacienty
- nedostatečně provedenou aretací při polohování výsuvného držáku s háčky
- provozem a převozem stojanu po povrchu, pro který není určeno
- údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou
- nezajištěním koleček základny proti pohybu stojanu

Instalace a uvedení stojanu do provozu

1. Důkladně prostudujte návod na obsluhu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál ze stojanu a ekologicky jej zlikvidujte.
3. Dle dodacího listu ověřte kompletnost dodávky a její stav.
V případě poškození výrobku dopravou je nutné při převzetí od přepravce ihned s ním sepsat reklamaci !!!
4. Je-li součástí dodávky stojanu i příslušenství /košík na infuze/, nainstalujte jej dle návodu k použití.
5. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí stojanu následovně:
 - Správné uchycení, pohyblivost a funkčnost brzdíček koleček základny.
 - Funkci aretačního šroubu a jeho správnou fixaci pro výsuvný držák.
6. Návod k použití pečlivě uchovejte pro případnou reklamaci.

Obsluha stojanu

Zvedání nerezového držáku s háčky ze základní polohy se provádí po uvolnění aretačního šroubu zvednutím jednou rukou a zaaretováním druhou rukou po docílení požadované polohy. Poté vyzkoušíme, zda horní držák je dostatečně fixován, aby po zatížení háčků nedošlo k uvolnění.

V poslední fázi je nutné zajistit kolečka základny proti pohybu stojanu.

U provedení stojan ISNL-1 je držák fixován na eurolištu /stolku lůžka/ o rozměrech 25x10 mm.

Stojan může být vybaven snímatelným košíčkem nebo odkapávací nádobou.

UPOZORNĚNÍ !!!

Při více infusích nezatěžujte stojan pouze na jedné straně, aby nedošlo k převrácení !!!

Servis a ošetření

Během užívání stojanu je nutné jednou za 3 měsíce provést kontrolu uchycení koleček a fixačního šroubu.

Pro ošetření lakované základny stojanu se používá leštěnka na nábytek a pro desinfekci prostředky na bázi lihu, např. GUTTAR

Nevhodné mycí a desinfekční prostředky se silnou koncentrací mohou způsobit zahnědnutí a fleky nerezových povrchů. Na tato poškození se nevztahuje záruka.

Při ošetřování je nutné vyloučit abrazivní čisticí a mycí prostředky jako je písek či drátěnka.

Při jakémkoliv závažnější mechanické závadě je nutné volat odborný servis nebo přímo výrobce dle níže uvedeného kontaktu.

POZN.: V případě použití jiného desinfekčního prostředku se porad'te s výrobcem !!!

Záruka

Na stojan je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.


Likvidace výrobku

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Obalový odpad vzniklý při uvedení výrobku do provozu roztříd'te dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k jeho dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové a ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

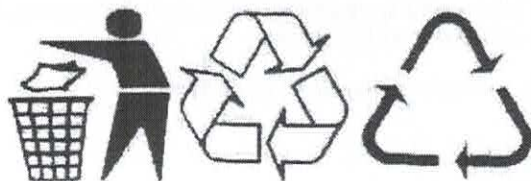

Distributor:
ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 27544737