

Před použitím si řádně přečtěte tento návod !



Návod k obsluze lehátka typ HS280 výškově stavitelného pomocí hydropohonu



Lehátko je určeno do zdravotnických zařízení, k rehabilitaci, vyšetření a masážím. Lehátko není určeno pro hraní a ke spánku. Lehátko je 2 dílné, výšková stavitelnost je od 54-92 cm i s pacientem, hmotnost 65 kg, nosnost 150 kg. Lehátko je vyrobeno ze zdravotně nezávadných materiálů. Atesty jsou uloženy u výrobce. Za bezpečnost při provozu odpovídá zaškolená obsluha. Zvyšování horní desky lehátka provádíme šlapáním na pedál. Snižování horní desky lehátka provádíme nadzvednutím pedálu nožní páky špičkou nohy. Nedoporučujeme při nošení zvedat lehátko za horní desku tak, že spodní část lehátka stojí na zemi. Omezíte tím nasávání vzduchu do pístu a tím menšímu pružování horní desky po letech provozu.

Podhlavník je dlouhý 64 cm je plynule nastavitelný od 0 do + 60° pomocí ovládací páčky z boku.

⚠ NEBEZPEČÍ HROZÍ !

Když někdo strká jakoukoliv část těla pod čalouněnou desku v místě konstrukce v okamžiku, kdy osoba nadzvedne nožní páku pedálu – hrozí skřípnutí konstrukcí.

Při odjištění ovládací páčky podhlavníku nestrkat části těla mezi rám a podhlavník - hrozí skřípnutí.

Název firmy výrobce: ROUSEK
výroba a expedice ul. Nádražní 219
fakturace na adresu: Zborovská 435
549 01, Nové Město nad Metují,
e-mail: rousek@rousek.eu, <http://www.rousek.eu/>, Česká Republika

pracovní doba: 7-11:30, 12-15:30 hod.
tel. fax / zázn: +420 491 470 767
mobil +420 608 505 567
č. účtu: 8259100277 /0100
IČ: 40133443 DIČ: CZ6503253031

Před použitím si řádně přečtěte tento návod !

ÚDRŽBA:

Případné zjištěné výrobní závady nahlaste výrobcí nebo distributorovi.

K běžné údržbě konstrukce a koženky postačí hadřík se saponátovým prostředkem zředěným vodou. Pokud chcete dezinfikovat konstrukci i koženku, můžete k tomu použít přípravek např. Incidur ve spreji, který je již naředěn k přímému použití. Životnost čalouněných desek zvýšíte před ztvrdnutím a popraskáním tím, že je budete chránit před sluncem, mrazem a potem papírovými zdravotními podložkami nebo jiným zdravotním potahem. Z výroby jsou otočné díly namazány vazelinou pro dlouhodobé použití.

Má-li lehátko pojezdová kolečka jsou určena pro přesun lehátka bez pacienta např. úklid, přejezd z místnosti do místnosti. Při přejíždění přes práh dveří a při výškovém rozdílu ve výtahové šachtě lehátko přizvedněte! Po 2 letech namažte plochu na kterou dosedají zvedací exentry (na 4 místech), které vysouvají kolečka. Začne-li lehátko s vypnutými pojezdovými kolečky pod zátěží popojíždět je nutné zkontrolovat červené koncovky v nohách (vysoké 5 mm). Jsou-li odřeny nebo chybí zašleme Vám nové.

Olejem ve spreji WD-40 zakoupeným s lehátkem, prostříkněte 1 x za rok všechny vrzající otočné díly jako jsou např. píst plynové pružiny, čepy stavitelných dílu, čepy táhel.



Na základě Vaší objednávky výrobce provede povinnou periodickou bezpečnostně technickou kontrolu zdravotnického prostředku – lehátka (1x za 2 roky).

Lehátko bude zkontrolováno, doplněno a případně opraveno.

Na základě této kontroly Vám výrobce vystaví zprávu o stavu lehátka.

Kontrolu cizích lehátek výrobce neprovádí.

Záruční a pozáruční servis na konstrukci lehátka zajistí výrobce.

Při reklamaci pošlete kopii záručního listu na adresu dodavatele s popisem závady.

V případě poruchy hydroponu Vám naše firma přiveze a přemontuje hydropon špatný za dobrý.

TECHNICKÉ ÚDAJE HYDROPOHONU:

typ Jihlavan - Z 12-20 / 140, pracovní kapalina - olej OH - HM 46, objem 0,2 dm, hmotnost je - 3,6 kg

Rozsah teplot okolního prostředí - 20° až + 55° C, záruční doba na hydropon je 2 roky.

Při Vašem zásahu do vnitřku hydroponu v době záruky, zaniká nárok na bezplatný servis.

Rychlost sjíždění horní desky = zasouvání pístu je pevně nastaven od výrobce hydroponu.

Při dodržení těchto zásad Vám zaručíme klidný a spolehlivý provoz.

Název firmy výrobce: ROUSEK
výroba a expedice ul. Nádražní 219
fakturace na adresu: Zborovská 435
549 01, Nové Město nad Metují,
e-mail: rousek@rousek.eu, <http://www.rousek.eu/>, Česká Republika

pracovní doba: 7-11:30, 12-15:30 hod.
tel. fax / zázn: +420 491 470 767
mobil +420 608 505 567
č. účtu: 8259100277 /0100
IČ: 40133443 DIČ: CZ6503253031

Prohlášení o shodě

číslo jednací - *HS280*

Podle § 13 odst. 2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů , ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a podle § 7 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

vydává toto prohlášení výrobce: **Rousek Roman**
Zborovská 435, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 40133443

na výrobek: **Vyšetřovací rehabilitační lehátko výškově stavitelné**
typ **HS280**, třída **I**

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek - Vyšetřovací rehabilitační lehátko typ HS280 je výškově stavitelné, pomocí nožní hydrauliky, určené pro rehabilitaci, vyšetřovny apod., zařazený podle § 6 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. do třídy I, splňuje základní požadavky přílohy č. I a je za obvyklého použití jak je popsáno v návodu k použití pro svůj účel bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zdravotnických prostředků uváděných na trh s jejich technickou dokumentací se základními požadavky.

Pro posouzení základních vlastností výrobku stanoveným způsobem bylo použito postupu podle přílohy č. XII. nařízení vlády č. 336/2004 Sb.

K danému postupu je u výrobce uložen soubor technické dokumentace.

Výrobce dále prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky nařízení vlády č. 169/1997 Sb., což dokládá certifikátem (protokolem) číslo 0548/9/98/TZ-V,M,O-NA,NB, ze dne 17.3.1998, vydaným zkušebnou ITI v Brně.



Dne: 4.9.2004

.....
V Novém Městě nad Metují

Rousek Roman majitel podpis a razítko