



Návod k obsluze transportního vozíku PL120 CROSS s pevnou výškou

Je určeno do zdravotnických zařízení k převážení pacientů po venkovních a vnitřních prostorách. Vozík slouží k běžnému převážení jednoho pacienta. Není určeno pro hraní a ke spaní! Pro převoz jsou určena madla u hlavy a nohou. Po obou stranách jsou sklopné zábrany. Převažet pacienta je povoleno pouze se zvednutými zábranami. Ke zvýšení bezpečnosti lze dokoupit 2 ks bezpečnostních upínacích pásů. Lze dokoupit nerezový výsuvný infúzní stojan s nosností 2 kg.

Vozík je vyroben ze zdravotně nezávadných materiálů. Atesty jsou uloženy u výrobce. Pro posouzení základních vlastností výrobku stanoveným způsobem bylo použito postupu podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. Za bezpečnost při provozu odpovídá zaškolená obsluha tímto návodem. Ložná plocha je 2 dílná, vnější délka vozíku je 203 cm (ohledně výtahu) a průjezdná šířka 74 cm, hmotnost 32 kg, převozní nosnost 160 kg.

⚠ NEBEZPEČÍ HROZÍ! Při převážení pacienta po nerovném terénu, popřípadě na šikmé na ploše. Obsluha je vždy povinná dbát nejvyšší opatrnosti. Při jakémkoliv opuštění vozíku obsluhou je nutné sešlápnutím ovládacího oblouku u noh pacienta zabrzdit kola o pr. 600 mm! Rovněž zajistit pacienta sklopnými zábranami, případně i bezpečnostními pásy pokud je vozík jimi vybaven.

Nejsou-li funkční brzdy vozík se nesmí používat. Pacienta nechat na vozíku bez dozoru může obsluha pouze na vlastní nebezpečí. Výrobce neručí za případné rozjetí vozíku.

Při odjištění ovládací páčky podhlavníku nestrkejte části těla mezi rám a podhlavník - hrozí skřípnutí. Když v ostré zatáčce (90°) jedete vyšší rychlostí jak 10 km / hod s pacientem mohlo by dojít k převrácení vozíku!

⚠ ÚDRŽBA: Případné zjištěné výrobní závady nahlase včas výrobcí nebo distributorovi.

K běžné údržbě konstrukce a koženky postačí hadřík se saponátovým prostředkem zředěným vodou. Pokud chcete dezinfikovat konstrukci i koženku, můžete k tomu použít přípravek např. Incidur ve spreji, který je již nařazen k přímému použití. Životnost čalouněných desek zvýšíte před ztvrdnutím a popraskáním tím, že je budete chránit před sluncem, mrazem a potem papírovými zdravotními podložkami nebo jiným zdravotním potahem.

Návštěvu technika lze využít i pro demontáž popraskaného, nehygienického čalounění, které bude do 10 dnů přečalouněno do atestovaných koženek (viz vzorník) a zasláno zpět.

Z výroby jsou otočné díly namazány vazelínou pro dlouhodobé použití.

Ke každému vozíku patří odkládací košík, v obou rozích u podhlavníku jsou otvory pro infúzní tyč.

Vozíky mají standardně namontovány sklopné zábrany z obou stran. V každém rohu ochranné nárazové kolečko, po obvodu ochranná lišta (25x10mm) proti proražení koženky zavíracích se dveří.

⚠ Jednou za rok nechte překontrolovat Vaším údržbářem především brzdový systém jeho účinnost, uchycení všech kol a celkový stav vozíku.

U brzd zkontrolujte rýhované válečky, které jsou zatlačovány do plné pneumatiky je-li rýhování odřeno je zapotřebí pootočít brzdící váleček a řádně utáhnout. Brzdící váleček by měl být při zabrzdění zatlačen do bezdušové pneumatiky 3 mm. Není-li tomu tak seřídte to povolením posunutím a utažením 2 ks šroubků M5.

Na základě Vaší písemné objednávky provedeme kontrolu.

Datum příští kontroly: je po 2 letech od nákupu vozíku. Naším technikem bude vozík zkontrolován, doplněn a případně opraven. Bude vystavena zpráva o stavu vozíku. Informativní cena 200 Kč + DPH / vozík. Doporučujeme zavolat minimálně měsíc dopředu, aby se cena za dopravu rozložila do co nejvíce zákazníků a nepřesáhla tak druhých 200 Kč. Kontrolu cizích vozíků neprovádíme.

Záruční a pozáruční servis na konstrukci vozíku zajistí výrobce.

V případě reklamace pošlete: kopii záručního listu Českou poštou s popisem závady nebo Faxem

Název firmy výrobce: ROUSEK
výroba a expedice ul. Nádražní 219
fakturace na adresu: Zborovská 435
549 01, Nové Město nad Metují,
e-mail: rousek@rousek.eu, <http://www.rousek.eu/>, Czech Republic

pracovní doba: 7-11:30, 12-15:30 hod.
tel. fax / zázn: +420 491 470 767
mobil: +420 608 505 567
č. účtu: 8259100277 / 0100
IČ: 40133443 DIČ: CZ6503253031

ES Prohlášení o shodě
číslo jednací – *PL120 CROSS*



Podle § 13 odst. 2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů , ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a podle § 7 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

vydává toto prohlášení výrobce: **Rousek Roman**
Zborovská 435, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 40133443

na výrobek: **Převozní lehátko**
typ **PL120 CROSS**, třída **I**.

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek – Převozní lehátko s pevnou výškou typ PL120 CROSS, určené pro převážení pacientů po chodbách a venkovních prostorech., zařazený podle § 6 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. do třídy I., splňuje základní požadavky přílohy č. I a je za obvyklého použití jak je popsáno v návodu k použití pro svůj účel bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zdravotnických prostředků uváděných na trh s jejich technickou dokumentací se základními požadavky.

Pro posouzení základních vlastností výrobku stanoveným způsobem bylo použito postupu podle přílohy č. XII. nařízení vlády č. 336/2004 Sb.

K danému postupu je u výrobce uložen soubor technické dokumentace.



Dne: 28.10.2004

V Novém Městě nad Metují

.....
Rousek Roman majitel podpis a razítko