

Před použitím řádně přečtěte tento návod k obsluze !

## Návod k obsluze lehátka typ RS220 výškově stavitelného pomocí elektropohonu

Je určeno do zdravotnického zařízení, k rehabilitaci, vyšetření a masážím. Lehátko není určeno pro hraní a ke spánku. Lehátko je 2 dílné, výšková stavitelnost je od 56-92 cm i s pacientem, hmotnost 65 kg, nosnost 150 kg. Lehátko je vyrobeno ze zdravotně nezávadných materiálů. Atesty jsou uloženy u výrobce. Za bezpečnost při provozu odpovídá zaškolená obsluha. Lehátko po rozbalení ponechte v místnosti (při cca 20°C) alespoň 10 min (pro vyrovnání tlaku a teplot). Vzduchová hadička ovladače je již zasunuta do elektropohonu. V případě, že by Vám **lehátko správně neregulovalo** na ovladač, je zapotřebí **na 2 vteřiny vysunout a zasunout hadičku od elektro pohonu** (umístěné ze spodní strany).

Lehátko je dvoudílné, pouze podhlavník je možné manuálně nastavovat.

Podhlavník je dlouhý 64 cm je plynule nastavitelný od 0 do +60° pomocí páčky z boku lehátka.

Při odjištění ovládací páčky podhlavníku nestrkat části těla mezi rám a podhlavník - hrozí skřípnutí.



**NEBEZPEČÍ HROZÍ !** když někdo strká jakoukoliv část těla pod čalouněnou desku v místě konstrukce, bez vytažení zástrčky ze zásuvky el. sítě! Přírodní kabel k elektropohonu je na 230 V, proto pozor na tento přívod hlavně za vlhka! Dbejte na to, aby kabel nebyl poškozen! Např. při zakopnutí o kabel a vytržení ze svorky. Lehátko s porušenou izolací nesmí být používáno! Dodržujte 2 minuty provozu a 20 minut odpočinku elektropohonu.

**Údržba:** Případné zjištěné výrobní závady nahlase výrobcí nebo distributorovi. 1x ročně nechte překontrolovat přírodní kabel odborným pracovníkem. K běžné údržbě konstrukce a koženky postačí hadřík se saponátovým prostředkem zředěným vodou. Pokud chcete dezinfikovat konstrukci i koženku, můžete k tomu použít přípravek např. Incidur ve spreji, který je již naředěn k přímému použití. Životnost čalouněných desek zvýšíte před ztvrdnutím a popraskáním tím, že je budete chránit před sluncem a potem papírovými zdravotními podložkami nebo jiným zdravotním potahem. Z výroby jsou otočné díly namazány vazelínou pro dlouhodobé použití. Pouzdra v trubce ramen o pr. 40 mm (8ks) jsou samomazná.

Má-li lehátko pojezdová kolečka jsou určena pro přesun lehátka bez pacienta např. úklid, přejezd z místnosti do místnosti. Při přejíždění přes práh dveří a při výškovém rozdílu ve výtahové šachtě lehátko přizvedněte! Po 2 letech namažte plochu na kterou dosedají exentry (na 4 místech), které vysouvají kolečka. Začne-li lehátko s vypnutými pojezdovými kolečky pod zátěží popojíždět, je nutné zkontrolovat červené koncovky v nohách (vysoké 5 mm). Jsou-li odřeny nebo chybí zašleme Vám nové.

Olejem ve spreji WD-40 zakoupeným s lehátkem, prostříknete 1 x za rok všechny vrzající otočné díly jako jsou např. píst plynové pružiny, čepy stavitelných dílů, čepy táhel.



Na základě Vaší objednávky provedeme 1x za 2 roky **POVINNOU BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKOU KONTROL U LEHÁTKA.** Bude zkontrolováno, doplněno a případně opraveno. Na základě této kontroly Vám vystavíme zprávu o stavu lehátka. Kontrolu cizích lehátek neprovádíme.

Záruční a pozáruční servis na kostru lehátka zajistí výrobce.

V případě reklamace pošlete kopii záručního listu na adresu dodavatele s popisem závady.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE ELEKTROPOHONU:**

typ Hanning KL88 F (s bezpečnostní spojkou = v tahu nemá žádnou sílu) zdvih 200 mm, hmotnost je 6 kg

V případě poruchy elektropohonu Vám dodáme v překližkové vratné bedně elektropohon jiný, který Vám místní údržbář vymění dle návodu. Poškozený vložíte do překližkové vratné bedny a zašlete zpět.

Při neoprávněném zásahu do vnitřku elektropohonu v době záruky, zaniká nárok na bezplatný servis.

Při dodržení těchto zásad Vám zaručíme klidný a spolehlivý provoz.

Název firmy výrobce: ROUSEK  
výroba a expedice ul. Nádražní 219  
fakturační na adresu: Zborovská 435  
549 01, Nové Město nad Metují,  
e-mail: [rousek@rousek.eu](mailto:rousek@rousek.eu), <http://www.rousek.eu/>, Česká Republika

pracovní doba: 7-11:30, 12-15:30 hod.  
tel. fax / zázn: +420 491 470 767  
mobil +420 608 505 567  
č. účtu: 8259100277 /0100  
IČ: 40133443 DIČ: CZ6503253031

## Prohlášení o shodě

číslo jednací - RS 220

Podle § 13 odst. 2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů , ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a podle § 7 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

vydává toto prohlášení výrobce: **Rousek Roman**  
Zborovská 435, 549 01 Nové Město nad Metují  
IČO: 40 133 443

na výrobek: **Vyšetřovací rehabilitační lehátko výškově stavitelné**  
typ **RS 220**, třída **I**.

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek - Vyšetřovací rehabilitační lehátko elektricky výškově stavitelné, typ RS 220, určené pro rehabilitaci, vyšetřovny apod., zařazený podle § 6 nařízení vlády č.336/2004 Sb. do třídy I, splňuje základní požadavky přílohy č. I a je za obvyklého použití jak je popsáno v návodu k použití pro svůj účel bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zdravotnických prostředků uváděných na trh s jejich technickou dokumentací se základními požadavky.

Pro posouzení základních vlastností výrobku stanoveným způsobem bylo použito postupu podle přílohy č. XII. nařízení vlády č. 336/2004 Sb. ve znění nařízení vlády č. 130/1999 Sb.

K danému postupu je u výrobce uložen soubor technické dokumentace

Výrobce dále prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky nařízení vlády č. 169/1997 Sb., což dokládá certifikátem (protokolem) na elektropohon číslem S 9310319, ze dne 23.3.1993, vydaným zkušebnou v Kölnu



Dne:  
V Novém Městě nad Metují

.....  
Rousek Roman majitel, podpis a razítko