



Před používáním lehátka si řádně přečtěte tento návod!



Návod k montáži lehátka typ RS240

Jednorázový obal z papírové vlnité lepenky je ekologicky recyklovatelný. Jsme registr. v syst. EKO-KOM. Po rozbalení lehátka je na straně kliky upevněný imbus klíček č.5, kterým povolíte kliku a otočíte ji do pracovní polohy tak, abyste utáhli šroub v místě plošky, a tak upevnili kliku.

Návod k obsluze lehátka RS240 výškově stavitelného pomocí kliky

Je to zdravotnický prostředek určen do zdravotnických zařízení, k rehabilitaci, vyšetření, masážím.

Není určeno ke spánku.

Lehátko je vyrobeno ze zdravotně nezávadných materiálů. Atesty jsou uloženy u výrobce.

Za bezpečnost při provozu odpovídá zaškolená obsluha.

Otáčením klikou jste schopni snadno zvednout pacienta na lehátko až do hmotnosti 150 kg.

Nikdy nepřenášejte lehátko uchopením za kliku. U lehátka je ve standardu montován plynový posilovač.



NEBEZPEČÍ HROZÍ:

Když někdo při točení kliky strká jakoukoliv část těla pod čalouněnou desku v místě konstrukce.

Když se pacient opře o podhlavník a vy odjistíte páčku podhlavníku lehátka, pokud ho nedržíte druhou rukou sklopí se dolů, v tento okamžik může pacient nebo obsluha strčit část těla mezi podhlavník a rám a ten ji pak může poranit.

ÚDRŽBA:

Případné zjištěné výrobní závady nahlase výrobcí nebo distributorovi

K běžné údržbě konstrukce a koženky postačí hadřík se saponátovým prostředkem zředěným vodou.

Pokud chcete dezinfikovat konstrukci i koženku, můžete k tomu použít přípravek např. Incidur ve spreji, který je již nařazen k přímému použití. Životnost čalouněných desek zvýšíte před ztvrdnutím a popraskáním tím, že je budete chránit před sluncem a potom papírovými zdravotními podložkami nebo jiným zdravotním potahem. Životnost čalouněných desek zvýšíte před ztvrdnutím a popraskáním tím, že je budete chránit před sluncem a potom, papírovými zdravotními podložkami, nebo jiným zdravotním potahem.

Olejem ve spreji WD-40 zakoupeným s lehátkem prostříkněte 1 x za rok všechny vrzající otočné díly jako jsou např. axiální ložiska, píst plynové pružiny, čepy zádového dílu, čepy táhel a ramen.



Při častějším zvedání lehátka s pacientem doporučujeme namazat závit zvedacího šroubu jednou za 2 roky, vazelinou například Mogul. (olej se nesmí používat)

Má-li lehátko pojezdová kolečka jsou určena pro přesun samotného lehátka (uklizení, přejezd z místa do místa). Začne-li lehátko s vypnutými pojezdovými kolečky pod zátěží popojíždět, je nutné zkontrolovat červené koncovky v nohách (vysoké 5 mm). Jsou-li odřeny nebo chybí zašleme Vám nové.

Na základě Vaší objednávky provedeme 1x za 2 roky kontrolu lehátka. Bude zkontrolováno, doplněno a opraveno. Možnost po dohodě odvezení desek k pře čalounění-viz. ceník na www.rousek.zde.cz

Na základě této kontroly Vám vystavíme zprávu o stavu lehátka.

Záruční a pozáruční servis na konstrukci lehátka zajistí výrobce.

Při dodržení těchto zásad Vám zaručujeme klidný a spolehlivý provoz.

Název firmy výrobce: Rousek Roman
výroba a expedice ul. Nádražní 219
fakturace na adresu: Zborovská 435
549 01, Nové Město nad Metují,
e-mail:rousek@rousek.eu, <http://www.rousek.eu/>, Czech Republic

pracovní doba: 7-11:30, 12-15:30 hod.
tel.: +420 491 470 767
mobil +420 608 505 567

Prohlášení o shodě
číslo jednací – RS240



Podle § 13 odst. 2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a podle § 7 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

vydává toto prohlášení výrobce: **Rousek Roman**
Zborovská 435, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 40133443

na výrobek: **Vyšetřovací rehabilitační lehátko výškově stavitelné na kliku**
typ **RS240**, třída **I**.

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek - Vyšetřovací rehabilitační lehátko výškově stavitelné pomocí kliky, typ RS240, určené pro rehabilitaci, vyšetřovny apod., zařazený podle § 6 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. do třídy I, splňuje základní požadavky přílohy č. I a je za obvyklého použití jak je popsáno v návodu k použití pro svůj účel bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zdravotnických prostředků uváděných na trh s jejich technickou dokumentací se základními požadavky.

Pro posouzení základních vlastností výrobku stanoveným způsobem bylo použito postupu podle přílohy č. XII. nařízení vlády č. 336/2004 Sb.

K danému postupu je u výrobce uložen soubor technické dokumentace

Dne: 2.9.1999

V Novém Městě nad Metují

.....

Rousek Roman majitel podpis a razítko