

# Easymove

## Podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko

### Úvod

Patent č. ZL 00227606.2

Registrační certifikát pro zdravotnickou pomůcku č. 2004 1260007

Easymove je nejlepší pomůckou pro přenášení pacienta mezi nosítky, operačním stolem, nemocničním vozíkem, lůžkem, lehátkem pro CT, atd.. Při přenášení a ošetřování může ulevit bolesti pacientů tím, že umožňuje stabilní a bezpečný pohyb, a dále také snižuje náročnost práce zdravotnického personálu.

#### 1. Návod k použití:

- Nejdříve zvedněte nemocniční vozík do stejné výšky jako lůžko nebo operační stůl (nejvyšší rozdíl může být 15 cm), vozík by měl být co nejbližší k lůžku a na každé straně operačního stolu (lůžka) musejí stát dvě osoby;
- Když je pacient přenášen z lůžka na vozík, osoba stojící u lůžka podepře pacienta v oblasti ramen a hýždí, pootočí pacienta k sobě, aby druhá osoba mohla rozbalit podložku Easymove a zasunout ji pod pacienta z jedné třetiny nebo jedné čtvrtiny. Osoba u lůžka podrží pacienta za ramena a hýždě a pokud by mohlo dojít k vysmeknutí pacienta, osoba u lůžka posouvá podložku dopředu, jakmile je přenášení dokončeno, osoba u lůžka podložku Easymove odstraní.
- Pokud je mezi lůžkem a vozíkem mezera (maximálně 15 cm), je lepší použít prostěradlo natažené pod pacientem a stejným způsobem pacienta přesunout. Uchopte prostěradlo a podsuňte Easymove pod prostěradlo, přičemž pacient leží na boku. Pak společně s druhou osobou posouvejte prostěradlo na podložku, jedna osoba táhne k sobě a druhá lehce posouvá dopředu. Jakmile je přenášení dokončeno, odstraňte podložku Easymove stejným způsobem jako je uvedeno výše.

#### 2. Upozornění

- Je nutno zajistit, aby zdravotnický personál používal podložku Easymove kvalifikovaně.
- Mezi vozíkem a lůžkem nesmí být mezera větší než 15 cm.
- Při přenášení pacienta musí být vozík zajištěn proti pohybu.
- Pokud použijete pro přesun i prostěradlo, nelze jej nadměrně táhnout nebo posouvat.

### 3. Údržba a sterilizace

Podložku Easymove je možné otírat vlhkým textilním hadříkem. Na očištění šedé části podložky je zakázáno používat hrubý kartáč. Červený kryt podložky lze vyprat ve vodě s teplotou 60 ° Celsia a lze jej sterilizovat v jakémkoli běžném antiseptickém prostředku, aniž by došlo k poškození.

4. Není nutno odstraňovat podložku Easymove z vozíku nebo lehátka při rentgenovém snímkování. Podložka je prostupná pro rentgenové záření, aniž by ovlivňovala radiaci.

**Distributor:**

**ROUSEK s.r.o.**

Zborovská 435

549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 27544737

tel.: 491 470 767

[www.rousek.eu](http://www.rousek.eu)

