

Návod na údržbu nerezových výrobků

- Ošetřování nerezových výrobků (materiál - AISI 304, ČSN 17240, DIN 1.4301) lze provádět flanelovou utěrkou nebo papírovou utěrkou pomocí saponátových prostředků pro mytí nerezového nádobí a konečné doleštění pomocí okenních čističů ve spreji např. Mr Muscle, které jsou dostupné ve všech drogistických prodejnách.
- Nikdy nepoužívejte pro čištění ostré předměty nebo prostředky s obsahem brusných částic (písek, CIF atd.), které mohou způsobit poškrábání nerezové desky.
- Ošetření a mytí provádíme vlhkou utěrkou s běžnými neagresivními saponátovými prostředky (bez brusných částic).
- Desinfekci provádíme schváleným desinfekčním prostředkem pro zdravotnictví GUTTAR

POZOR !

V případě použití jiných čisticích, mycích nebo desinfekčních prostředků na bázi chloru, jodu, kyslíčků atd. hrozí chemická reakce, která může způsobit vznik skvrn nebo zahřnutí nerezových ploch.

U pohyblivých dílů (kolečka, čepy atd.) může dojít k silné oxidaci a zadření dílů.

UPOZORNĚNÍ:

Při použití jiného desinfekčního prostředku se poraďte s výrobcem (dodavatelem) tohoto prostředku, neboť mohou vzniknout nevratné škody poškozením povrchu a funkčních dílů nerezového výrobku.

Na takové poškození se nevztahuje záruka.

Provádění servisu je nenáročný a vyžaduje pouze kontrolu a promazání čepů koleček. Pravidelně odstraňujeme zjevné nečistoty a každých 6 měsíců lehce čepy promazeme a kontrolujeme správné utažení šroubů koleček.

Toto **promazání je obzvláště nutné při používání desinfekce**, která zadírá kluzné části.